

## NZOZ Genomed

### Genomed S.A.

ul. Ponczowa 12

02-971 Warszawa

Tel: 22 644 60 19, 22 498 2 498, Fax: 22 644 60 25

[diagnostyka@genomed.pl](mailto:diagnostyka@genomed.pl)

GENOMED\_20

## Zestaw NORGEN do samodzielnego pobrania DNA zawartego w ślinie.

### Instrukcja Obsługi

**30 minut przed pobraniem próbki śliny nie należy jeść, pić, palić, żuć gumy, myć zębów ani przepłukiwać ust płynem do płukania jamy ustnej.**

#### Przygotowanie:

Dostarczenie próbki śliny w sposób określony w punktach 3-10 zajmuje większości osób od 2 do 5 minut. Przed pluciem należy rozluźnić i delikatnie pocierać policzki przez 30 sekund, do momentu wytworzenia się śliny.



1. Przepłukać usta wodą.
2. Odczekać 10 min.
3. Pluć do momentu, aż płynna ślina (nie piana) wypełni rurkę do linii napełnienia wyznaczającej objętość 2 mL (wskazanej na ilustracji).
4. Jeśli w pobranej próbce śliny znajdują się bąbelki powietrza usunąć je poprzez delikatne stukanie denkiem probówki o twardą powierzchnię.
5. Odkręcić i usunąć lejek dołączony do probówki.



6. Przekręcić i usunąć końcówkę ampułki ze środkiem konserwującym.



7. Przelej całość środka konserwującego do probówki ze śliną, w razie konieczności ściskając ampułkę.



8. Zakręć probówkę używając dołączonej zakrętki. Upewnij się, że probówka jest dobrze zamknięta.
9. Potrząsać zakręconą probówką przez 10 sekund, aby dokładnie wymieszać próbkę śliny ze środkiem konserwującym.



10. Próbkę śliny została zakonserwowana i jest gotowa do transportu
11. Probówkę przed wysłaniem należy okleić załączoną naklejką z wypisanymi czytelnie danymi pacjenta:  
**imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL.**
12. Następnie zapakować do koperty bąbelkowej i wraz z wypełnionym zleceniem wykonania badania oraz deklaracją świadomej zgody przesłać na adres NZOZ Genomed.

Przeznaczenie: Niniejszy produkt zaprojektowany został z myślą o bezpiecznym pobieraniu próbek ludzkiej śliny.

Zawartość: Ampułka zawiera 2 ml płynu NORGEN Biotek Corp.

Ostrzeżenia: W razie kontaktu płynu NORGEN Biotek Corp. z oczami bądź skórą dane miejsce należy przemyć wodą. Nie spożywać.

Przechowywanie: **Przechowywać w temperaturze pokojowej, 15-30°C.**